

# Juditta

L'alternativa all'allettamento



ITALIANO COD. 220161 - 10-2015

 design and quality  
**MADE IN ITALY since 1980**

by **ORMESA**<sup>®</sup>



- ✓ **seduta ergonomica, sostiene, accoglie**
- ✓ **scarico pressorio ben distribuito**
- ✓ **igienica e traspirante**
- ✓ **facili trasferimenti**
- ✓ **personalizzabile**
- ✓ **3 modelli basculanti**

Juditta è l'alternativa all'allettamento, per pazienti adulti o anziani che necessitano di uno stazionamento prolungato o permanente in carrozzina o a letto

È un sistema di seduta indicato per soggetti con diversi gradi di disabilità, si adegua anche ai casi più complessi

Permette una posizione stabile e confortevole contrastando atteggiamenti posturali scorretti o patologici

La sua particolare forma e struttura consentono traspirabilità, igiene e comfort





I modelli B30 e B60 sono omologati per il trasporto in auto secondo le norme: **ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19**



✓ **seduta ergonomica,  
sostiene, accoglie**

per la particolare  
forma dello  
schienale, della  
seduta e del  
poggiatesta  
multiregolabile

**schienale ergonomico,  
accoglie le forme  
dell'utente**

La speciale struttura dello schienale consente un corretto allineamento del tronco e **non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali.**

Inoltre offre un alto livello di stabilità senza la necessità di utilizzare elementi contenitivi laterali aggiuntivi.

Ospita e previene le contratture e le deformità. Ridistribuisce e allevia la pressione aumentando il comfort della seduta per il soggetto

**schienale regolabile  
in altezza**

per adattarsi a utenti di diverse dimensioni



vista dall'alto



vista da dietro



vista dall'alto

## **poggiatesta multiregolabile**

La forma e le dimensioni del poggiatesta offrono stabilità senza bloccare il movimento laterale del capo. Il poggiatesta segue la forma dello schienale assicurando il corretto allineamento tra capo e tronco



Regolabile in altezza




in inclinazione



in antero-posteriore



in traslazione laterale

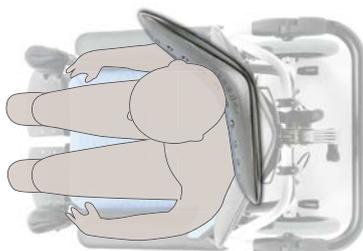

L'elevata escursione in profondità e l'ampia traslazione laterale del poggiatesta assecondano le diverse esigenze dell'utente permettendo di seguire il capo in posizione decentrata rispetto all'allineamento tronco-bacino. L'insieme delle regolazioni migliora l'orientamento visivo del soggetto



vista laterale con fianco aperto

## **seduta**

Lo speciale rivestimento del sedile e la leggera inclinazione evitano lo scivolamento in avanti dell'utente

## **comfort**


Gli snodi meccanici dei poggiatesta e dello schienale sono vicini alle articolazioni fisiologiche dell'utente. Cambiando l'angolazione dei poggiatesta e dello schienale, le articolazioni dell'anca e del ginocchio non si modificano

✓ **confortevole...  
scarico pressorio  
distribuito**

*Il peso è uniformemente distribuito tra seduta e schienale escludendo picchi pressori sulla zona ischiatica. La forma ed il materiale di rivestimento evitano pressioni lungo la colonna vertebrale*



Inclinazione e reclinazione influenzano positivamente la pressione migliorando l'ossigenazione nel tessuto cutaneo e muscolare

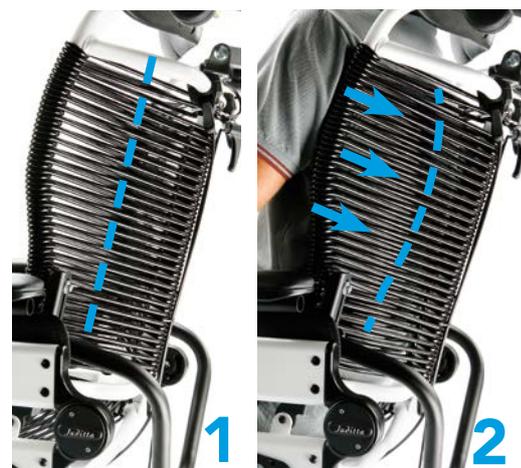

**basculamento e reclinazione**

Il basculamento e la reclinazione dello schienale consentono di ricercare la situazione ideale di appoggio e sostegno. Questo permette una variazione dei punti pressori, prevenendo la formazione di ulcere da pressione.



Il basculamento e la reclinazione sono gestiti da due molle a gas indipendenti che assorbono il peso dell'utente e ne facilitano la gestione da parte dell'assistente.

Il materiale semi-elastico della seduta e dello schienale segue l'anatomia dell'utente, adattandosi, senza generare pressione e/o sfregamento (vedi foto 1 materiale a riposo, foto 2 materiale sotto carico)



## validazione clinico scientifica


Studi condotti sulla **Juditta** mostrano una ottimale redistribuzione del peso corporeo, con conseguente riduzione dei picchi pressori e riduzione del rischio di insorgenza di ulcere da pressione

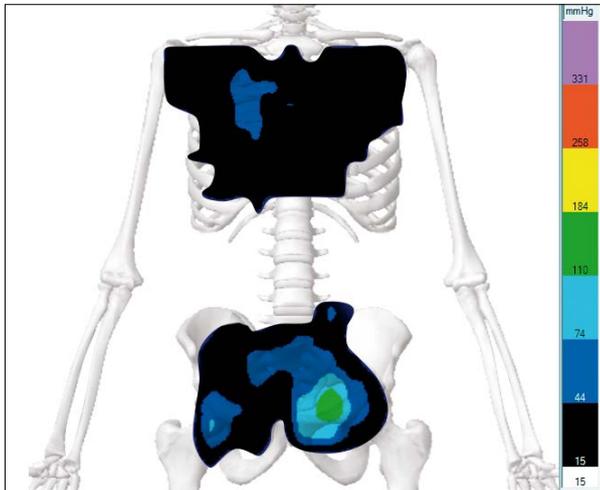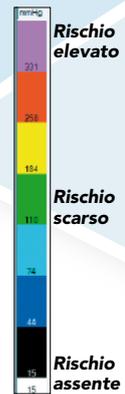

Juditta con max basculamento, max reclinazione schienale, pedane sollevate. Paziente (adulto medio) appena posizionato

### **Juditta, il nostro concetto di seduta per pazienti costretti all'allettamento**


Le speciali corde semi-elastiche si adattano alle forme e al peso dell'utente aumentando così le superfici di contatto di schiena e seduta, con il risultato di una notevole riduzione dei picchi pressori

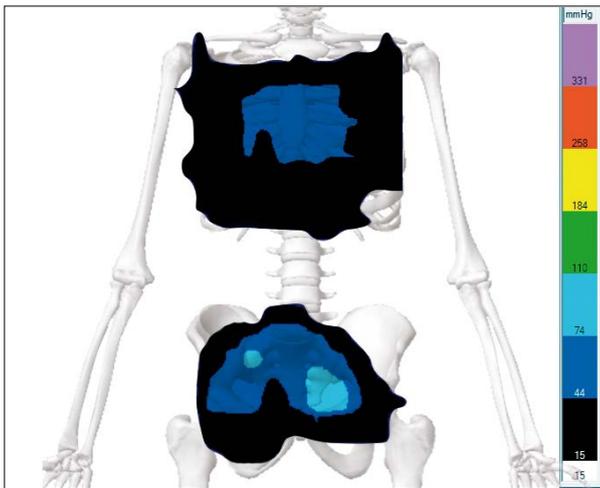

Juditta con max basculamento, max reclinazione schienale, pedane sollevate. Paziente (adulto medio) posizionato da 90 minuti

### **scarico pressorio prolungato**

Anche a distanza di 1 ora e 30 minuti dal posizionamento dell'utente le speciali corde semi-elastiche continuano a mantenere la loro caratteristica contenitiva, mentre il carico pressorio diminuisce

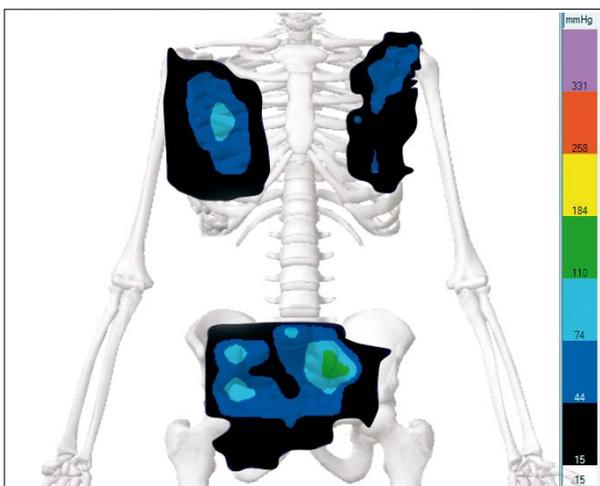

Juditta risultato senza tappezzeria

### **carico pressorio assente sui corpi vertebrali**

A sinistra è possibile notare una situazione di sicurezza per l'utente con scarichi pressori contenuti. Rimuovendo la tappezzeria, le pressioni sono assenti lungo tutto il tratto vertebrale. Questo rende Juditta particolarmente indicata per soggetti paraplegici o affetti da infiammazioni post operatorie.



## igienica e traspirante

lo speciale materiale di rivestimento e la tappezzeria, entrambi altamente traspirabili, permettono il **passaggio dell'aria** mantenendo un microclima ottimale



### poggiatesta antibatterico

realizzato con uno speciale materiale a cellule chiuse altamente resistente agli agenti chimici esterni



### igienica, traspirante, confortevole e durevole nel tempo

seduta e schienale sono rivestiti con **materiale semi-elastico ignifugo, resistente, traspirante ed antiscivolo, realizzato con una speciale formula esclusiva ORMESA**



tappezzeria facilmente rimovibile per il lavaggio

### Tappezzeria con tessuto di alta qualità made in ITALY

**Ignifugo:** le proprietà ignifughe sono intrinseche nel filato e non provengono da trattamenti aggiuntivi.

**Riciclabile:** ciclo produttivo a ridotto impatto ambientale.

**Massima resistenza allo sfregamento**

**Certificato Oeko-Tex di Classe 1:** la massima classe raggiungibile per prodotti tessili a diretto contatto con la pelle, destinati a neonati e bambini. Garanzia di qualità e sicurezza per la salute.

**Colori durevoli e altamente resistenti** al sudore, alla luce e al lavaggio a secco e in lavatrice (vedi libretto istruzioni)



ANTIFIAMMA CERTIFICATO  
IMO RES. A652





## facili trasferimenti

*L'apertura dei fianchi  
a forbice* permette il  
trasferimento dell'utente  
in modo sicuro e semplice,  
senza ostacoli







# personalizzabile e adattabile alle diverse esigenze degli utenti

la sua versatilità ne consente l'utilizzo ottimale da parte di utenti con taglie e necessità diverse



**Poggiagambe** estraibili,



Vista dall'alto

girevoli,




regolabili in inclinazione senza sforzo



**Pedane** regolabili in altezza ed in flessione



**Freni** a tamburo a comando unico

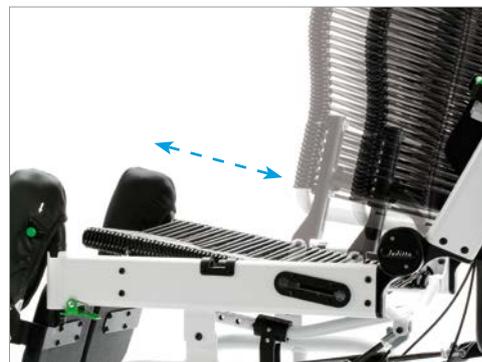

**Seduta** regolabile in profondità su quattro posizioni. Mantiene gli stessi gradi di reclinazione dello schienale sui 4 livelli di profondità





**Maniglione di spinta**  
regolabile in inclinazione/  
altezza, permette una  
comoda gestione da parte  
dell'assistente anche  
quando la Juditta è in  
posizione sdraiata.



**Schienale reclinabile**  
tramite levette con perno  
di sicurezza. Il perno  
consente di bloccare le  
levette per mantenere la  
regolazione individuata  
per l'utente



**Braccioli imbottiti**, regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta



**Fianchette con apertura a forbice.**  
Mediante il particolare snodo, il bracciolo si posiziona dietro lo schienale, eliminando completamente ostacoli al trasferimento



**Schienale abbattibile**  
per il trasporto



## 3 modelli basculanti

Ideati per i  
diversi ambienti  
di utilizzo



### B30

Basculante, con ruote piene:  
- anteriori piroettanti da 8"  
- posteriori da 12" con freni a  
tamburo a comando unico

Riconducibile per omogeneità  
funzionale ai seguenti Codici ISO:  
- 18.09.18.012 - 18.09.18.220  
- 18.09.18.202 - 18.09.18.235  
- 18.09.18.205



### B12

basculante da interno, 4 ruote piene  
piroettanti da 5", freni sulle ruote  
posteriori

Riconducibile per omogeneità  
funzionale ai seguenti Codici ISO:  
- 18.09.18.012 - 18.09.18.205  
- 18.09.18.202 - 18.09.18.220

### B60

Basculante, con ruote piene:  
- anteriori piroettanti da 8"  
- posteriori da 22" con freni

Riconducibile per omogeneità  
funzionale ai seguenti Codici ISO:  
- 18.09.18.012 - 18.09.18.220  
- 18.09.18.202 - 18.09.18.235  
- 18.09.18.205 - 12.24.21.106





**824-F** tavolo regolabile in profondità, con blocco di sicurezza  
Cod. ISO (riconducibile) 12.27.03.127

Costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo



**824-R** tavolo reclinabile, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza  
Cod. ISO 18.09.18.229



**828** cintura addominale



**834** divarcatore imbottito, regolabile in antero-posteriore ed in altezza  
Cod. ISO (riconducibile) 18.09.18.223



**911** Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati, ecc.) Solo per modello B30 e B60. Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio



**892** cuscino imbottito, asportabile per pedana



**896** cuscino imbottito, asportabile per tavolo 824



**905** kit freni manuali per le ruote posteriori



**914** bloccaggio pedane. Unisce le pedane separate formando una pedana unica  
Cod. ISO (riconducibile) 18.09.18.217




**916** fascia unica poggiamambe imbottita. Sostituisce i poggia polpacci rigidi imbottiti



**933** asta portaflebo




**936** tappezzeria asportabile per poggiatesta

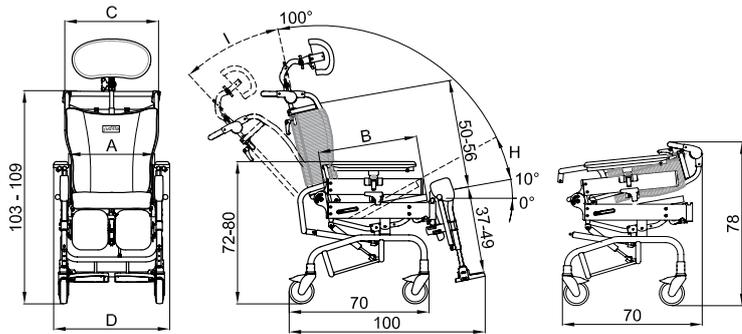


Juditta B12	misura 36	misura 40	misura 45	misura 50
<b>A</b> Larghezza sedile	cm 36	cm 40	cm 45	cm 50
<b>B</b> Profondità sedile	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49
<b>C</b> Larghezza schienale	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57
<b>D</b> Larghezza totale	cm 58	cm 58	cm 63	cm 68
<b>H</b> Inclinaz. sedile (basculam.)	da 10° a 35°			
<b>I</b> Inclinaz. schienale	da 13° a 38°			
Peso ausilio	kg 35	kg 35	kg 36	kg 37
Portata max	kg 100	kg 120	kg 130	kg 140

il numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

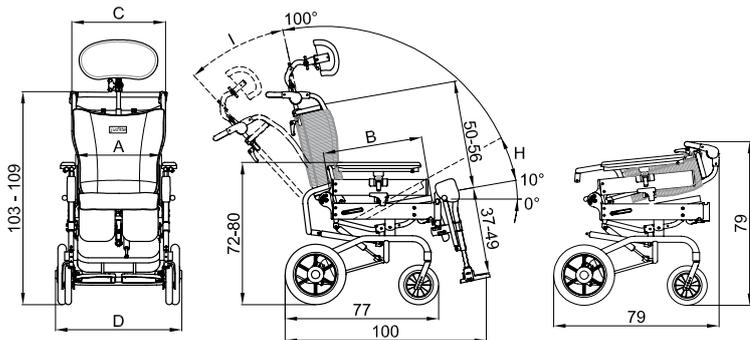

Juditta B30	misura 36	misura 40	misura 45	misura 50
<b>A</b> Larghezza sedile	cm 36	cm 40	cm 45	cm 50
<b>B</b> Profondità sedile	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49
<b>C</b> Larghezza schienale	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57
<b>D</b> Larghezza totale	cm 62	cm 62	cm 67	cm 72
<b>H</b> Inclinaz. sedile (basculam.)	da 10° a 35°			
<b>I</b> Inclinaz. schienale	da 13° a 38°			
Peso ausilio	kg 38	kg 38	kg 39	kg 40
Portata max	kg 100	kg 120	kg 130	kg 140

il numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

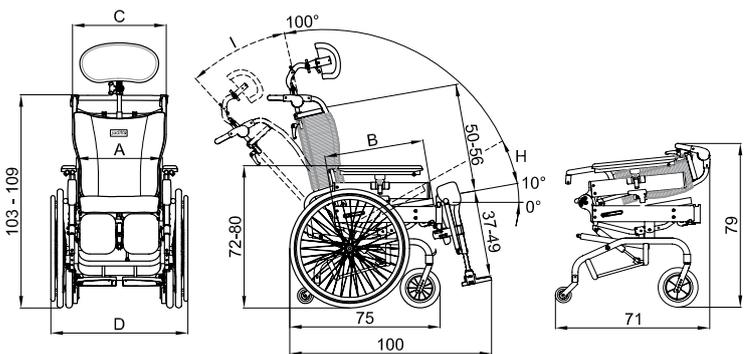

Juditta B60	misura 36	misura 40	misura 45	misura 50
<b>A</b> Larghezza sedile	cm 36	cm 40	cm 45	cm 50
<b>B</b> Profondità sedile	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49
<b>C</b> Larghezza schienale	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57
<b>D</b> Larghezza totale	cm 69	cm 69	cm 74	cm 79
<b>H</b> Inclinaz. sedile (basculam.)	da 10° a 35°			
<b>I</b> Inclinaz. schienale	da 13° a 38°			
Peso ausilio	kg 41	kg 41	kg 42	kg 43
Portata max	kg 100	kg 120	kg 130	kg 140

il numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

Si ringraziano per l'ospitalità e la collaborazione  
 la Residenza Protetta per Anziane Opera Pia Bartolomeo Castori  
 e l'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno.

Rivenditore Autorizzato

**ORMESA** s.r.l.  
 Via A. Da Sangallo, 1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY  
 TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637  
 info@ormesa.com-www.ormesa.com



AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV  
 = ISO 9001 =